



croma

For creators of beauty.

Faden Lifting


Patienteninformation

Princess® Lift
Absorbable PDO



„Wir können den Lauf
der Zeit nicht anhalten,
aber wir können das
Rad der Zeit zurück-
drehen.“



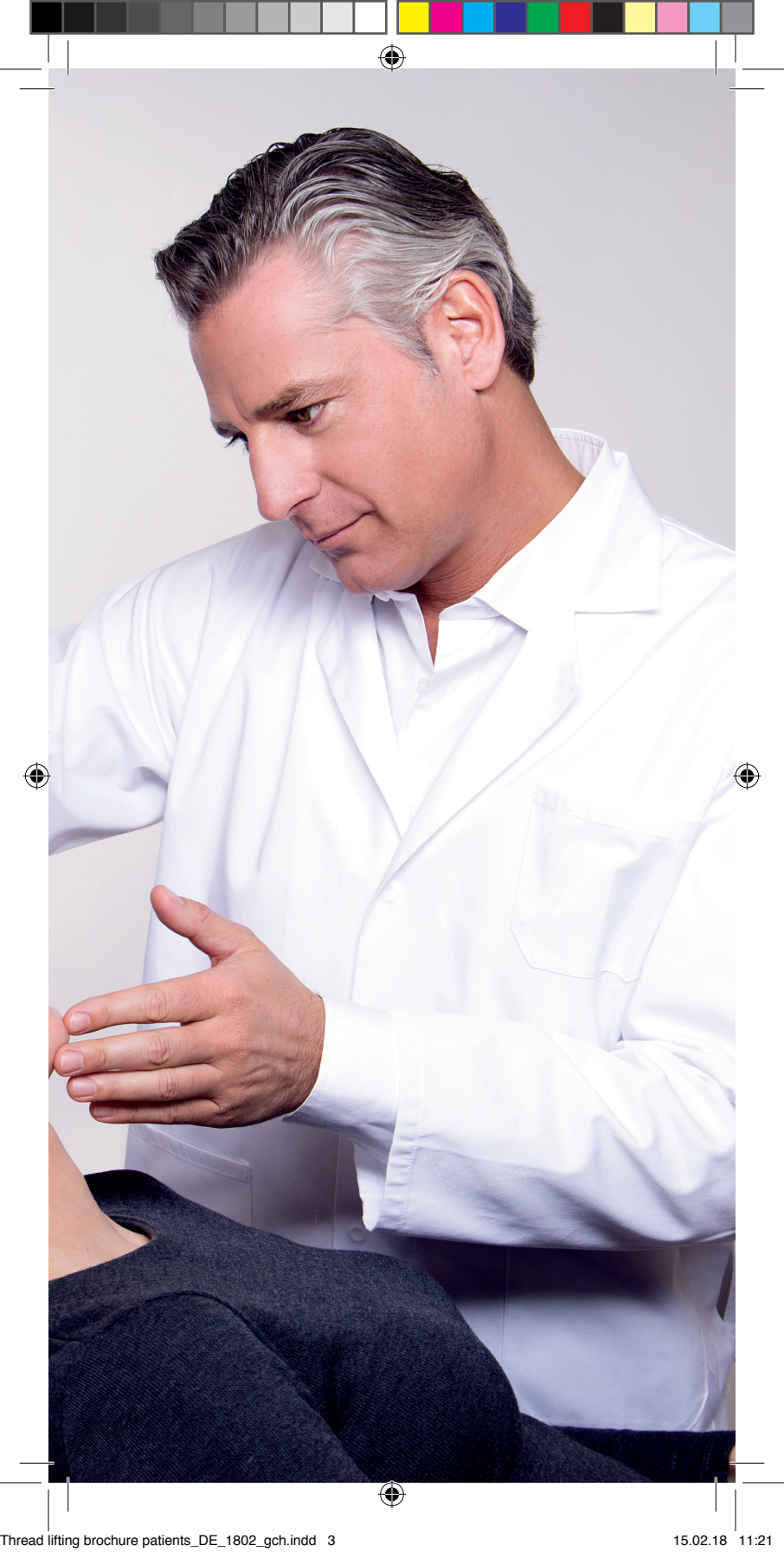





Der natürliche Alterungsprozess bedeutet nicht, auf Schönheit und ein jugendliches Aussehen verzichten zu müssen.

Der Alterungsprozess, der etwa ab dem 30. Lebensjahr einsetzt, kehrt das so genannte „Dreieck der Schönheit“ um. Als Teenager und in unseren 20ern haben wir hohe Wangenknochen, volle Wangen und eine gut definierte Kinnpartie, doch dieses Dreieck entwickelt sich mit der Zeit in die andere Richtung. Das Gewebe erschlafft und tiefe Furchen und Falten bilden sich – die äußeren Zeichen dafür, wie sich die Stützstruktur im Inneren der Haut verändert.

Fadenlifting ist Ihr Schlüssel dazu, das Rad der Zeit ein Stück zurückzudrehen. Es handelt sich um eine minimalinvasive Methode mit einer kurzen Genesungszeit, die Sie um Jahre jünger aussehen lässt, ohne dass Sie sich einem großen Eingriff unterziehen oder mit sichtbaren Narben rechnen müssen.

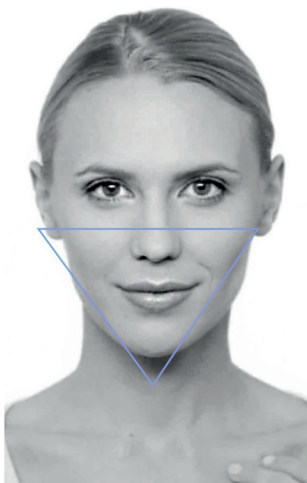

Dreieck der Schönheit einer 20-jährigen

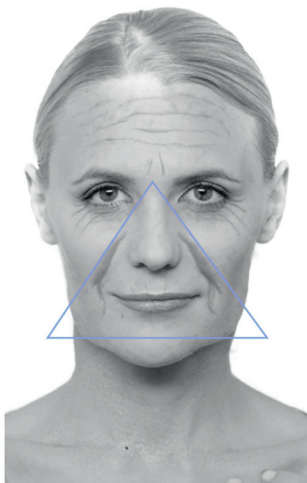

Dreieck der Schönheit mit zunehmendem Alter





Was ist Fadenlifting?

Es handelt sich hierbei um eine neue innovative Methode der Gesichtsverjüngung, die den Vorteil eines nicht chirurgischen Eingriffes bietet und somit nur kurze Genesungszeit erfordert. Das Material besteht aus abbaubaren Fäden, die längst in der Chirurgie ihre Anwendung finden. Während der Behandlung werden Fäden in die Haut eingeführt. Sie verbinden dich mit dem Unterhautgewebe und führen bei entsprechender Lage zu einem Zug in die gewünschte Richtung. Dadurch entsteht eine leichte Raffung von Unterhautgewebe und Haut, die nach einigen Tagen durch die natürliche Bindegewebsvermehrung (Fibrosierung) verfestigt wird.

Hierfür gibt es eine Methode, die es erlaubt, die Haut zu heben und die Hypodermis mit minimalem Aufwand für einige Zeit und nahezu risikofrei zu straffen. Im Vergleich zum herkömmlichen Facelifting bietet das Fadenlifting den Patienten Vorteile. Es bedeutet weniger Stress, weil dieser Eingriff wesentlich kleiner ist. Es gibt keine sichtbaren Narben und die Heilung ist im Allgemeinen sehr schnell. Weitere Vorteile des Verfahrens: geringe Behandlungsdauer (ca. 15 bis 40 Minuten). 20-30 Minuten vor der Behandlung muss die Anästhesie angewendet werden. Diese hat ein geringes Risiko für Schmerzen und Entzündungen. Das Ergebnis ist gleich nach dem Eingriff zu sehen.



Anwendungsbereiche

Je nach Absprache mit dem Arzt und Behandlungsbereich können verschiedene Arten von Fäden und Behandlungstechniken angewendet werden. Folgende Bereiche von Gesicht und Körper können behandelt werden:



Stirn
Augenbrauen
Wangen
Kinnbogen
Hals
Dekollete
Arminnenseiten
Hände
Knie
Oberschenkel-
innenseiten
Gesäßbacken
Bauch



Wie verläuft das persönliche Beratungsgespräch?

Vor der Behandlung haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem Arzt ein persönliches Beratungsgespräch zu führen. Dort erfahren Sie alles über die Behandlung im Allgemeinen und über die Risiken und Möglichkeiten. Bitte äußern Sie dabei Ihre Wünsche und Erwartungen. Nach dem



Beratungsgespräch wird Ihr Arzt den/die zu behandelnden Bereich/e untersuchen. Dabei wird er besonders auf die Haut und ihre Elastizität achten. Ihr Arzt wird natürlich auch all Ihre Fragen beantworten.

Wie funktioniert die Behandlung?

Der Behandlungsbereich wird lokal betäubt und der resorbierbare Faden in das Gewebe eingeführt. Die Art und die Anzahl der verwendeten Fäden werden vorher mit Ihnen besprochen.

Mit diesem minimalinvasiven Verfahren wird neues Bindegewebe um den Faden herum aufgebaut, sodass die Haut straffer und glatter wird. Bestimmte Arten von Fäden können außerdem das Gesichtsgewebe anheben und so in seine ursprüngliche Position zurückbringen. Diese neue und sanfte Methode hinterlässt weder Wunden noch Narben. Die Fäden werden nach gewisser Zeit (je nach Art des Fadens) vom Gewebe resorbiert. Die Ereignisse sind für längere Zeit sichtbar. Ihr Arzt kann Ihnen hierzu genauer Auskunft geben.

Welche Arten von Fäden werden für diese Behandlung verwendet?

Es handelt sich um resorbierbare Fäden, die für ein minimalinvasives Lifting und eine Revitalisierung des Gewebes in die Haut eingeführt werden.

Ist für diese Behandlung eine Narkose notwendig?

Es wird lediglich ein Lokalanästhetikum verwendet.





Wie lange dauert die Behandlung?

Je nach Behandlungsbereich etwa 15 bis 40 Minuten.

Welche Wirkung haben die Fäden?

Es gibt verschiedene Fäden für verschiedene Bedürfnisse. Sie alle straffen und glätten die Haut und sorgen für ein frischeres, strahlenderes Hautbild. Je nach Art des verwendeten Fadens kann das Ergebnis bis hin zu einem Lifting oder einer Neuformung der Gesichtskonturen gehen. Wie lange die Wirkung anhält und wie stark sie ausfällt, hängt auch von der Art des Fadens ab. Ihr Arzt wird Ihnen dies gern genauer erläutern.




Wie lange halten die Ergebnisse an?

Wie lange die Ergebnisse anhalten, hängt von der Art der Fäden ab. Bitte fragen Sie Ihren Arzt nach weiteren Informationen.

Wie lange nach der Behandlung falle ich aus?

Je nach Art der Behandlung sind Sie 0 bis 3 Tage nicht arbeitsfähig.



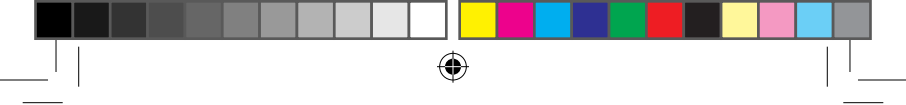

Wann sind die Ergebnisse der Behandlung sichtbar?

Die Ergebnisse sind direkt nach der Behandlung sichtbar; die volle Wirkung tritt etwa 3 bis 4 Wochen später ein.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Unmittelbar nach der Behandlung kann es zu lokalen Schwellungen und vorübergehendem Schmerzempfinden kommen, die durch Auflegen eines Kühlbeutels schnell zurückgebildet werden/verschwinden.

Bitte informieren Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt, sollten die Entzündungsreaktion oder andere unerwünschte Nebenwirkungen länger als eine Woche anhalten, damit Sie in geeigneter Weise behandelt werden können.

Wie viel kostet ein Fadenlifting?

Ihr Arzt gibt Ihnen gerne genaue Informationen zu den Kosten.

Für wen ist das Fadenlifting geeignet?

Für Männer und Frauen ab 30 Jahren mit dem Wunsch nach einer sichtbaren Verjüngung durch Straffung und Glättung der Haut, sowie ein minimalinvasives Lifting mit rascher Abheilzeit.



Wenn Sie sich für ein Fadenlifting entscheiden, empfehlen wir Ihnen die nachstehenden Tipps zu beachten.

Vor der Behandlung

- Zwei Wochen vor der Behandlung sollten Sie keine acetylsalicylsäurehaltigen Schmerzmittel wie Aspirin zu sich nehmen. Im Fall von Schmerzen können Sie als Alternative Paracetamol einnehmen.
- Informieren Sie Ihre Ärztin/ Ihren Arzt über alle Medikamente die Sie einnehmen und halten Sie bitte Rücksprache falls Sie kurzfristig vor dem Eingriff:
 - ◇ erkältet sind oder Halsschmerzen/Husten haben
 - ◇ eine Zahnoperation haben
 - ◇ schwanger werden
 - ◇ akute Infektionen oder Entzündungen (Akne, Herpes, ...) bemerken
 - ◇ sonstige Faktoren gegen einen Eingriff zum vereinbarten Zeitpunkt sprechen
- Unmittelbar vor dem Eingriff sollten Sie auf den Genuss von Alkohol und Nikotin verzichten und den Konsum von Heißgetränken vermeiden.

Nach der Behandlung

- Unmittelbar nach der Behandlung kann es zu lokalen Schwellungen und vorübergehendem Schmerzempfinden kommen, die durch Auflegen eines Kühlbeutels schnell zurückgebildet werden können.
- Um ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen, sollten Sie Ihrer Haut nach der Behandlung etwas Ruhe gönnen.
- Verzichten Sie ca. 2 Wochen auf längere Aufenthalte in der Sonne sowie den Besuch von Sauna und Dampfbad.
- Meiden Sie in der ersten Zeit nach der Behandlung exzessive Gesichtsbewegungen beim Kauen, Sprechen, Gähnen etc. sowie Gesichtsmassagen.





- Unterziehen Sie sich bis zu 2 Wochen nach der Behandlung keinem zahnärztlichen Eingriff.
- Seien Sie vorsichtig mit körperlichen Aktivitäten. Insbesondere mit Kontaktsportarten und hochintensivem Training sollten Sie eine Zeit lang pausieren.
- Eine Schlafposition mit dem Gesicht nach oben und in erhöhter Position während der ersten Nächte nach dem Eingriff wird empfohlen.
- Wenn Sie nach der Behandlung ungewöhnliche Entwicklungen bemerken sollten oder andere Probleme im Zusammenhang mit dem Eingriff vermuten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihre Ärztin/Ihren Arzt.

Für wen ist das Fadenlifting geeignet?

Für Männer und Frauen ab 30 Jahren mit dem Wunsch nach einer sichtbaren Verjüngung durch Straffung und Glättung der Haut, sowie ein minimalinvasives Lifting mit rascher Abheilzeit.

Es eignet sich nicht für:

- Patienten, die sich ein umfassendes Lifting wünschen
- Patienten, deren Haut sehr stark erschlafft ist
- Patienten, die im Gesicht oder am Hals sehr viel Fettgewebe verloren haben
- Patienten mit einer Überempfindlichkeit gegen das Fadenmaterial
- Patienten, die an den zu behandelnden Hautregionen Infektionen oder akute Entzündungen haben (Akne, Herpes etc.)
- Patienten, die an einer Autoimmunkrankheit leiden und/ oder Immuntherapien erhalten
- Schwangere oder stillende Frauen
- Patienten mit Neigung zur Bildung hypertropher Narben
- Krebspatienten
- Personen unter 18 Jahren



croma

For creators of beauty.

Der Arzt bestätigt, den Patienten über die Risiken informiert zu haben, die in Verbindung mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Medizinproduktes bestehen.

CE 1023*

Vertrieb durch:

Croma-Pharma GmbH,
Industriezeile 6,
2100 Leobendorf, Austria.
Tel.: +43/2262/68468-0.
Fax.: +43/2262/68468-165,
e-mail: derma@croma.at

Croma Schweiz GmbH
Platz 3
6039 Root D4

Croma Deutschland GmbH
Landshuter Allee 8-10
80637 München

Manufactured by:

GRAND AESPIO INC.,
610 Nonhyeon-ro, Gangnam-gu,
Seoul 135-830, KOREA

European Representative:

DongBang AcuPrime, 1 The Forrest Units,
Hennock Road East, EXETER EX2 8RU, UK

Für weitere Informationen besuchen Sie



www.croma.at



Croma Pharma

DE_175_01_2018 | 35708